

Installationsanleitung aeroplus 5 Prüfsoftware

Systemvoraussetzungen:

- PC mit Windows 2000 / XP / Vista / 7
- USB-Schnittstelle
- Drucker

Step-by-Step Anleitung

1. Downloaden und Entpacken Sie die Installationsdatei aeroplus5_x_x_x_x.zip. (x_x_x_x steht dabei für die aktuelle Versionsnummer)
2. Schließen Sie das Gerät aeroplus 5 an die USB-Schnittstelle Ihres PCs an und schalten Sie das Gerät ein.
3. Windows erkennt nun die neue Hardware und installiert automatisch die nötigen Treiber. Ggf. wird ein Treiber für das Gerät benötigt. Dieser liegt im Unterverzeichnis CDM20812 des Verzeichnisses, in das Sie KroeberO2_x_x_x_x.zip entpackt haben
4. Installieren Sie nun die aeroplus 5 Prüfsoftware indem sie aeroplus 5\setup.exe in dem Verzeichnis, in das Sie aeroplus5_x_x_x_x.zip entpackt haben, starten.
5. Nach erfolgreicher Installation starten Sie aeroplus 5 über das Startmenu.
6. Geben Sie bitte die Registrierungsnummer ein.
7. Der Installationsvorgang ist abgeschlossen, die Prüfsoftware nimmt Verbindung zu aeroplus 5 auf.